

Physiopack®

Pachet rece sau cald pentru utilizari multiple



- Refolosibil
- Poate fi folosit rece sau cald
- 3 marimi disponibile

Producator: **BSN Medical SAS** – Franta/ Germania – www.bsnmedical.com

Distribuitor: **GENMARK Trading SRL**

Intr. Aniversarii nr 41, sector 3, Bucuresti

Mobil: 0723 691 580

e-mail: office@genmark.ro; www.genmark.ro

Physiopack®

Pachet rece sau cald pentru utilizari multiple



Physiopack® este un pachet cu gel pentru terapie rece sau calda.

Folosit rece pentru tratamentul traumelor musculare, ale tendoanelor si a ligamentelor, reducerea edemelor si rigiditatii musculare.

Inainte de a fi folosit, pachetul cu gel trebuie tinut pentru aproximativ 2 h la congelator la o temperatura de -15°C.

Folosit cald Physiopack maresc fluxul sanguin, elasticitatea si plasticitatea fibrelor de colagen. Pachetul cu gel poate fi reincalzit in apa fierbinte sau in cuptorul cu microunde.

Avantajele produsului

- Refolosibil
- Poate fi folosit cald sau rece

Indicatii

- Tratament si reabilitare musculara, a tendoanelor si/sau ligamentelor.
- Rani acute si sub-acute, cand este prezenta si umflatura (folositi-l rece pentru a crea vasoconstrictie)
- Afectiuni cronice precum hipertonicitate musculara sau boli reumatismale precum artrita reumatica (tratate cu caldura)

Nota

Un prosop de bumbac trebuie pus intre pielea pacientului si Physiopack pentru a evita arsurile/degeraturile. Se aplica pe membrul ranit pentru aproximativ 20 de minute.

Trebuie evitata supraincalzirea pachetului in cuptorul cu microunde. Nu incalziti pachetul la mai mult de 100C.

Prezentare

7cm x 38cm (220g); 13cm x 30cm (400g); 19cm x 30cm (720g)



Producator: **BSN Medical SAS** – Franta/ Germania – www.bsnmedical.com

Distribuitor: **GENMARK Trading SRL**

Intr. Aniversarii nr 41, sector 3, Bucuresti

Mobil: 0723 691 580

e-mail: office@genmark.ro; www.genmark.ro

